


EMDRKIT

Beknopte handleiding

- 1 Laad de EMDR Kit voor het eerste gebruik gedurende 8 uur op met de pulsators in de dockingstations.
- 2 Om laadproblemen te voorkomen raden wij aan om geregeld met een droog doekje de contactpunten van de Pulsators en dockingstations stofvrij te maken.
- 3 Download de EMDR Kit app op uw smartphone of tablet.
Android
Open de Playstore.
Zoek naar 'EMDR Kit' in de zoekbalk.
Selecteer het icoon van de EMDR Kit app.
Kies 'Install' om de app te installeren.
(Minimaal Android 4.3)
iOS (Apple)
Open de App store.
Zoek naar 'EMDR Kit' in de zoekbalk.
Selecteer het icoon van de EMDR Kit app.
Kies 'Install' om de app te installeren.
(Minimaal iOS 8.0)
- 4 Zet Bluetooth aan via de instellingen op uw smartphone of tablet. Open de EMDR Kit app en accepteer toegang tot locatie en gebruik van Bluetooth.
- 6 Zet de EMDR Kit aan (0=uit 1=aan). Koppel de te gebruiken onderdelen via het Bluetooth koppel menu in de app. We raden aan om bij het koppelen de Pulsators in de dockingsations te plaatsen en de Light tube aan de adapter aan te sluiten. De Headphone kunt u koppelen via de bluetooth instellingen van uw telefoon.
- 7 Start gebruik.

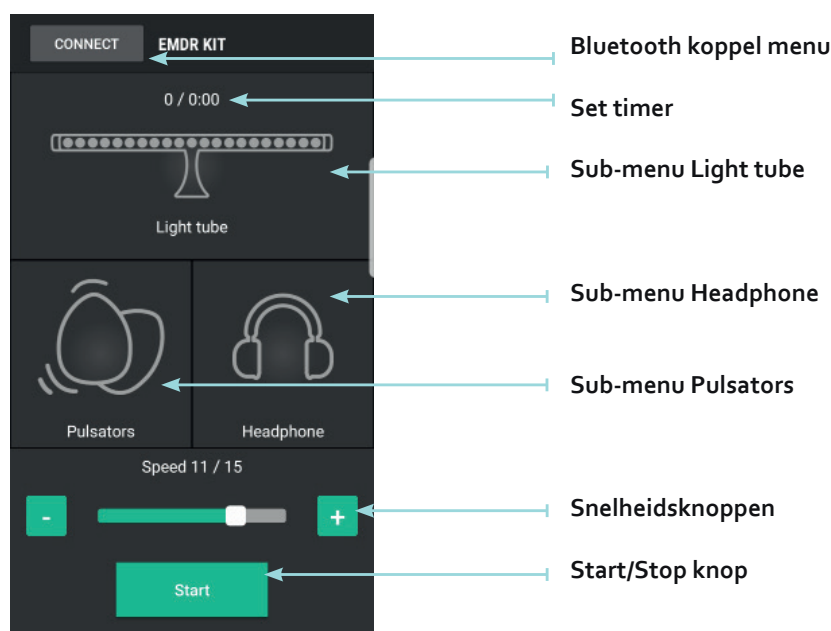

Hoofdscherm van de EMDR Kit app

EMDR^{..!}KIT

Cleaning protocol

Omdat de Pulsators door veel verschillende cliënten worden vastgehouden, is het belangrijk om de Pulsators schoon te maken. Ook kan er wat vuil of stof op de contactpunten van de pulsator komen. Dit stof of vuil kan het laadproces belemmeren.

U kunt een doek gebruiken, met een klein beetje alcohol om het oppervlak van de pulsator schoon te maken. Maak ook de contactpunten aan de onderkant van de Pulsators goed schoon. Zorg ervoor dat u niet te veel alcohol gebruikt, omdat dit de pulsator kan beschadigen.

Ook kunnen de contactpunten in de dockingstations in de voet van de Light Tube wat stof verzamelen. Regelmatig schoonmaken zorgt ervoor dat de pulsators effectief worden opgeladen.

